

# FLEXI-SEAL™

Fecal Collector

## Worek do zbiórki stolca z hydrokoloïdowym przylepcem

CE

 ConvaTec

### OPIS PRODUKTU

Worek do zbiórki stolca z rodziny Flexi-Seal z hydrokoloïdowym przylepcem zakończonym fizelinowym obramowaniem, wyposażony w kranik do opróżniania treści jelitowych oraz filtr neutralizujący zapachy.


### WSKAZANIA

Produkt stosować u pacjentów z inkontynencją stolca, w przypadku biegunki lub średnio uformowanego stolca.

### PRZECIWSKAZANIA


Nie stosować u pacjentów ze stwierdzoną wrażliwością na przylepiec, materiał worka oraz inne składniki zestawu.

### UŁOŻENIE PACJENTA

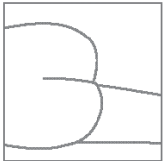

Pacjent powinien leżeć w pozycji bocznej na lewej bądź prawej stronie, z ugiętą nogą w kierunku klatki piersiowej tak aby ułatwić dostęp do okolicy okołodbytniczej.


### PRZYGOTOWANIE SKÓRY

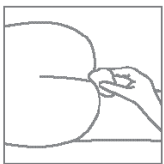


Stosuj sterylne rękawice podczas każdego etapu pracy. Oczyść dokładnie skórę w okolicy odbytu ciepłą wodą. Jeżeli stosowane są inne środki do mycia skóry dobrze je spłucz. Upewnij się, czy nie ma pozostałości pasty lub fragmentów lepnych po ostatnim worku. Obszar aplikacji powinien być suchy.

Ostrożnie usuń włosy z okolicy okołodbytniczej przy pomocy nożyczek. Możesz zastosować pastę Stomahesive w celu uszczelnienia i wyrównania powierzchni skóry przed aplikacją worka. Nałóż pastę na brzegach otworu przylepca, nigdy bezpośrednio na skórę pacjenta, następnie odczekaj 1 minutę zanim zaczniesz przyklejać worek.

### APLIKACJA WORKA DO ZBIÓRKI STOLCA

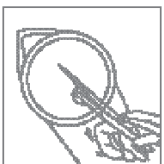


Jeżeli jest potrzeba, powiększ otwór przylepca. Otwór powinien być nieznacznie większy od odbytu tak, aby zapewnić szczelność.

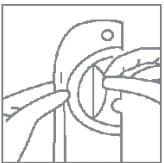

Usuń papier zabezpieczający z przylepca hydrokoloïdowego, pozostaw papier na części fizelinowej. Złóż na pół przylepiec hydrokoloïdowy przytrzymując plaster przy fizelinowych końcach, to ułatwi aplikację.


**NIE DOTYKAJ PALCAMI POWIERZCHNI PRZYLEPNEJ**

Rozdziel pośladki pacjenta i umieść część przylepną worka w szparze pośladkowej, naprzeciwko kroczka.

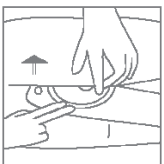

Umieść na początku hydrokoloïdową część przylepca wokół odbytu, następnie pomiędzy odbytem a kroczem i dokładne dopasuj przy pomocy dłoni.

Dopasuj hydrokoloïdowy przylepiec w szparze pośladkowej w ten sam sposób.

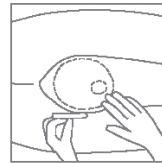


Usuń papier zabezpieczający z części fizelinowej, przyklej do skóry pośladków i wygładź. Jeżeli krawędzie przylepca dotykają waginy lub moszny, ostrożnie przytnij brzegi fizeliny.

Przytrzymaj mocno przez minutę, aby zapewnić dokładne dopasowanie całego zestawu.

### UMIĘSCOWIENIE WORKA DO ZBIÓRKI STOLCA

Ułóż worek gładko i równo pomiędzy nogami pacjenta, unikaj marszczenia i jego uciskania.


### WSKAZANIA DO STOSOWANIA

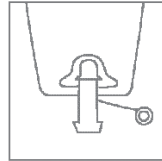


#### Przy płynnym stolcu:

Z workiem nocnym: połącz otwarty zawór worka do zbiórki stolca z łącznikiem worka na noc. Podczas przemieszczania: odłącz worek nocny i zamknij zawór worka do zbiórki stolca.


#### Przy częściowo uformowanym stolcu.

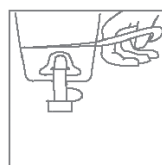

Utnij koniec worka ponad zaworem, do zamknięcia rękawa użyj klipsa dołączonego do zestawu.

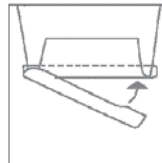

Zamknij szczelnie worek. Owiń rękaw worka wokół klipsa tylko raz. Mocno domknij klips. Otwórz klips rozdzielając jego krawędzie.

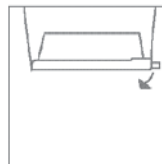

Otwieraj i zamykaj rękaw w miarę potrzeb oraz w przypadku oczyszczania worka. Nie pozwól aby worek do zbiórki stolca został wypełniony powyżej 1/3 całości.

### Czyszczenie worka

Przeplucz worek ciepłą wodą.


### USUWANIE WORKA

Odklej delikatnie fizelinę, a następnie część hydrokoloïdową przylepca, przytrzymuj skórę pacjenta ręką. Zabezpiecz worek przed wylaniem zgromadzonej treści jelitowej. Złóż płytkę hydrokoloïdową na pół, sklei brzegi przylepca ze sobą. Wyrzuć worek do kontenera na śmieci.



Stosuj worek Fecal Collector do zbiórki stolca z rodziny Flexi-Seal nie dłużej niż 48 godzin.

Więcej informacji i wskazówek w zakresie leczenia ran i prawidłowego zastosowania opatrunków uzyskasz pod bezpłatnym numerem Infolinii 800 120 093 lub na stronach [www.convatec.com](http://www.convatec.com), [www.cdiffficile.pl](http://www.cdiffficile.pl) [dzial.pomocy@convatec.com](mailto:dzial.pomocy@convatec.com)

 ConvaTec Limited  
First Avenue, Deeside Industrial Park  
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

ConvaTec Polska sp. z o.o., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. (22) 579 66 50

Wyprodukowano w USA

 ConvaTec

© 2016 ConvaTec Inc

\* / TM oznaczają znaki towarowe ConvaTec Inc

Data rewizji ulotki: grudzień 2016 r



Do użytku jednorazowego



Data ważności



Numer partii



Zapoznać się z instrukcją



Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone



W suchym miejscu



Przechowywać w temperaturze pokojowej